



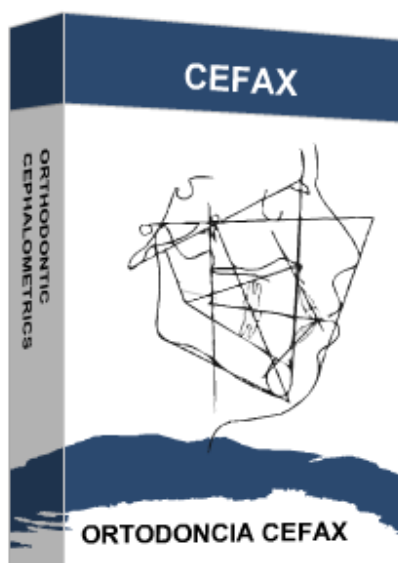

CEFAX es un programa que le permite realizar trazados cefalométricos de manera rápida y precisa a partir de la radiografía Lateral de Cráneo Digital para el diagnóstico dento-esquelético de sus pacientes.

- Ricketts
- McNamara
- Björk Jarabak
- Steiner
- Downs
- Wayne Bolton
- Galeria de Fotos

- Sin cuotas extras
- Asistencia Remota 24/7
- Actualizaciones gratuitas

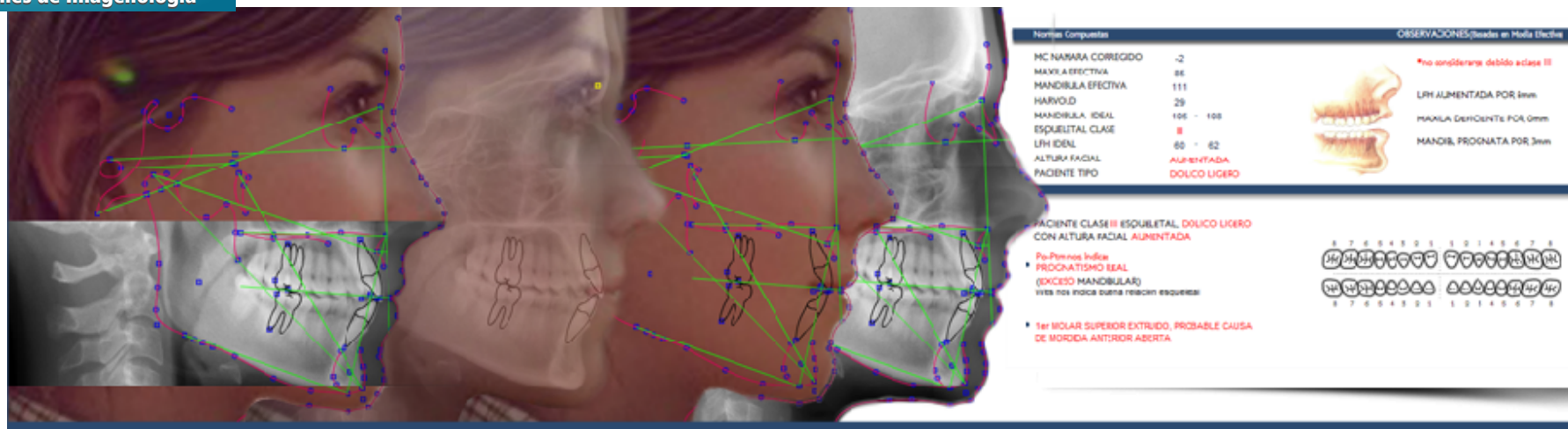

6 meses sin intereses
(Solo Tarjetas Participantes)



Win



Mac



CEFOX
DIAGNOSTICO DENTO-ESQUELETAL

Con una sola captura dispondrá de los análisis cefalométricos más populares con la ventaja de poder corregir la localización de los puntos cuantas veces sea necesario.

Asistente de ubicación de puntos cefalométricos

Aplica una terapéutica en el momento ideal.

Análisis de las vértebras cervicales para evaluar la maduración del paciente

Perfil Superior

Perfil Mesial

Orbitale

Negativo Relieve Normal

ETAPA CERVICAL 66

Radiografía

Brillo = 0 +
Relieve = 0 +
Zoom = 1 +

☐ Negativo ☒ Visible

Abrir

Trazado

☒ Puntos ☒ Trazado ☒ Perfiles ☒ Dientes

CALIBRACIÓN 45 mm

1.-RELACIÓN MOLAR	0 mm
2.-RELACIÓN CANINA	-3 mm
3.-OVERJET INCISIVO	2 mm
4.-OVERBITE INCISIVO	0.3 mm
5.-EXTRUSION 1 INF	-0.12 mm
6.-ANG. INTERINCISAL	127 °
7.-CONVEXIDAD	1.1 mm
8.-ALTURA FACIAL INF	43 °
9.-POSICIÓN 6 SUP	17 mm
10.- PROTUSIÓN 1 INF	2 mm

RADIOGRAFÍA

Permiten una mejor localización de los puntos cefalométricos. (Brillo, Relieve, Zoom, Negativo)

Herramientas

El análisis cefalométrico es altamente preciso, pues se genera sin distorsión y con gran nitidez.

Mediciones

Gefax ID: 2 Nombre: **ILSE FABIOLA** Editar Imprimir Nuevo Buscar Cefalometria Jarabak Rx [Iconos] 2:52 AM

Apellido: **DEMO** **DEMO** Guardar Cancelar
paterno materno

← como cargar las Fotos?

ANALISIS ESQUELETICO	Valor	Norma	D.E.		Valor	Norma	D.E.
1.- ANGULO SILLA(°)	125	123	5	15.- SNB(°)	79	78	1
2.- ANGULO ARTICULAR(°)	148	143	6	16.- ANB(°)	* 7	2	1
3.- ANGULO GONIACO(°)	116	130	7	17.- PLANO MANDIBULAR(°)	* 27	32	0
4.- SUMA TOTAL(°)	389	396	6	18.- CONVEXIDAD FACIAL(°)	* 11	-3.9	1
5.- MITAD SUPERIOR(°)	* 49	53.5	1.5	ANALISIS DENTAL			
6.- MITAD INFERIOR(°)	* 66	72.5	2.5	19.- ANG. INTERINCISAL(°)	127	135.4	5.76
+ 7.- BASE CRANEAL POST(mm)	31	32.4	3	20.- ANG I INFERIOR(°)	* 101	90	3
+ 8.- ALTURA DE LA RAMA(mm)	46	44.7	5	21.- ANG I SUPERIOR(°)	103	102	2
+ 9.- BASE CRANEAL ANT(mm)	70	71.7	3	22.- DISTANCIA I SUPERIOR(mm)	5.3	5	2
+ 10.- LONG CUERPO MDB(mm)	75	71.7	5	23.- DISTANCIA I INFERIOR(mm)	3.4	0	2
11.- ALTURA FACIAL POST(mm)	73	77.5	7.5	24.- LINEA ESTETICA A LAB SUP(mm)	-5.4	-2.5	1.5
12.- ALTURA FACIAL ANT(mm)	109	112.5	7.5	25.- LINEA ESTETICA A LAB INF(mm)	* -4.1	1	1
13.- POSTERIOR / ANTERIOR(%)	* 67	63.5	1.5	26.- CRANEAL POST/ALT RAMA(%)	0.67	0.8	0.15
14.- SNA(°)	* 85	80	1				

DIAGNOSTICO ESQUELETAL: CLASE II ESQUELETAL POR EXCESO MAXILAR, MESOCEFALICO
CON ALTURA FACIAL NORMAL Y PERFIL CONVEXO

DIAGNOSTICO DENTAL: OVERJET NORMAL, INCISIVO INFERIOR PROTUIDO.
ANGULO INTERINCISAL CERRADO, CENTRAL INFERIOR LABIALIZADO

PREDICCIONES DE CRECIMIENTO: ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO MANDIBULAR
CRECIMIENTO MANDIBULAR ESPERADO EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ

DIAGNÓSTICO

La información más útil y completa utilizando los métodos más populares y precisos a nivel mundial, McNamara, Ricketts, Jarabak, Steiner y Downs.

Analisis Cefalometricos

Es el único programa en el mercado que interpreta los diagnósticos con palabras para facilitar el estudio del caso y elegir la mejor decisión terapéutica.

Diagnostico Esqueletal

Diagnósticos considerando las normas que cambian con la edad.
Reportes detallados

Puede ingresar las medidas de los dientes manualmente en el odontograma para obtener el análisis de Bolton.

Analisis de Bolton de manera manual

Podrá utilizar la herramienta de zoom en ambos modelos lo cual permite una mejor localización de los puntos y un análisis más preciso.

Analisis de Bolton de manera Digital

Método para la evaluación de las discrepancias del diente-tamaño (diámetro mesio-distal de la corona) entre los arcos superiores e inferiores.

Analisis de Bolton

ID: 2
Nombre: ILSE FABIOLA
Iniciar
Guardar
Cancelar
Dx
12:35 PM

Analisis de Bolton

98 mm

47 mm

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

SUP 11 8 7 8 7 9 8 7 8 7 7 11

INF 12 8 8 7 7 6 6 6 7 7 8 12

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

94 mm

39 mm

RELACION ENTRE LOS ARCOS: 95.92 % IDEAL: 89.5 mm DISCREPANCIA: 4.5 mm

LA LONGITUD DEL ARCO INFERIOR DEL PACIENTE ES EXCESIVO

RELACION ENTRE ANTERIORES: 82.98 % IDEAL: 36.3 mm DISCREPANCIA: 2.7 mm

EXCESO DE MATERIAL DENTARIO EN LOS DIENTES ANTERIORES MANDIBULARES

Modelo Superior

Longitud Regla: 45

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

11 8 7 8 7 9 8 7 8 7 7 11

Modelo Inferior

Longitud Regla: 50

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6


12 8 8 7 7 6 6 6 7 7 8 12

Zoom

MODELOS

Crea rápidamente una presentación ordenada del tratamiento propuesto y evolución del mismo,
Galería de Fotos

Es muy útil para generar tranquilidad y confianza en el paciente.
Tarjeta de Presentación

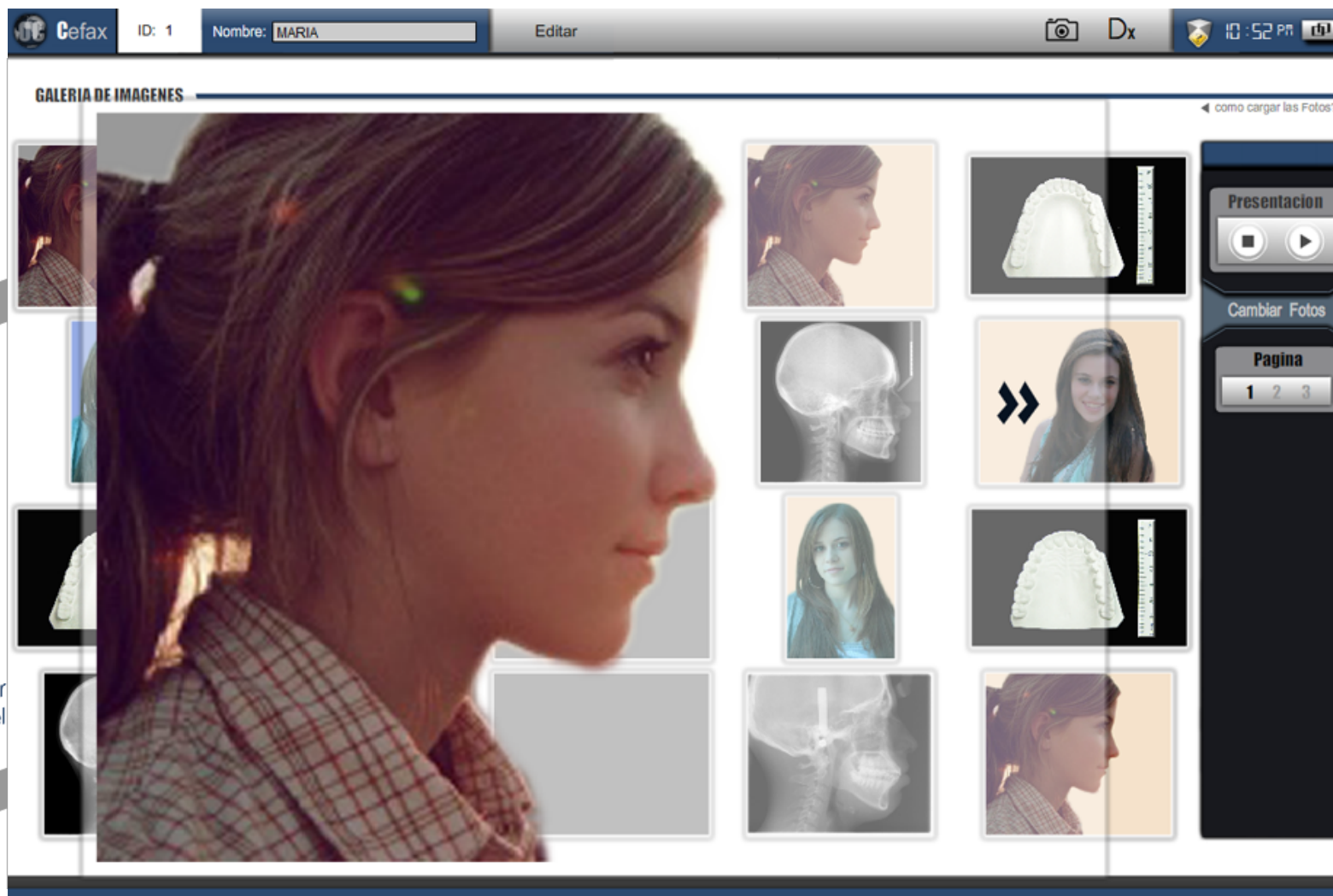

La presentación puede ser controlada manualmente o automáticamente con una pausa de 3 segundos en cada foto.

Control de Presentación

puede agregar o cambiar fotos fácilmente en cualquier momento.
60 Fotos por paciente

FOTOS

Requisitos del Sistema

Componente	Minimo	Optimo
Procesador	Procesador Intel® Pentium® 4 ó AMD Athlon®	Intel® Core 2 Duo o mayor
Disco Duro	50 MB de espacio libre para instalación	50 MB de espacio libre para instalacion
Memoria RAM	512 MB (winxp) 2 GB (vista,win7)	3 GB
Monitor	14" monitor	17" monitor
Sistema operativo	Windows XP, Vista, 7, 8 MAC OS X	Windows 7, 8 MAC OS X 10.8

Se puede utilizar la radiografía digital de cualquier gabinete radiologico o digitalizar con un scanner la radiografía analógica (film convencional).

Cefax soporta Radiografías y Fotos en formato "JPG" , "PNG" , "GIF".



RXDigital

RX Soluciones de Imagenología

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLOGÍA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol. Zapopan, Jalisco. MÉXICO

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra **Línea de
Productos Completa**

www.rxdigitalsoluciones.com

TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com

[f](#) [t](#) RxDigitalDental